

**Önleyici tedbirler ilaç tedavisinden daha kolay ve daha ucuzdur.**

**KLORTAB®**  
NaDCC



**NaDCC, kendisini süper bir klor verici haline getiren eşsiz özelliklere sahiptir.**

## Klortab® NaDCC Efervesan Yer ve Yüzey Dezenfeksiyon Tabletleri **KLORTAB® 10gr x 100 tablet**

Klortab® NaDCC Efervesan Dezenfektan Tabletler 10 gram nominal ağırlığa sahip olup, 5 gram aktif madde (NaDCC) ve 3 gram elde edilebilir klor içermektedir.

**Ticari takdim şekli: 100 tablet / kutu**

### **BİR HASTANE ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI NEDEN GEREKLİDİR?**

- » Hastaların ve çalışanların enfeksiyon riskini en aza indirmesi,
- » Hastaların diğer insanlara göre enfeksiyon riskine çok daha fazla hassas oluşları,
- » Hastanelerdeki çapraz enfeksiyon tehlikesi.

### **HASTANEDEN BULAŞAN ENFEKSİYON KONTROLÜNÜN ETKİLİLİK ÇALIŞMASI**

- » (STUDY ON EFFICACY OF NOSOCOMIAL INFECTION CONTROL (SENIC)

Amerika'da yapılan 6 yıllık bir çalışmada enfeksiyon kontrol programı uygulanan hastanelerde enfeksiyon oranının % 32 azaldığı tespit edilmiştir. Enfeksiyon kontrol programı uygulanmayan hastanelerde ise % 18 oranında bir artış olduğu görülmüştür.

# DOZAJLAMA TABLOSU ve KULLANIM ALANLARI

Önerilen Klortab Gücü	Su Miktarı (Litre)	Tablet Sayısı (Ad.)	Dezenfeksiyon Alanı	Kullanım Şekli
10.000ppm	3	10	Vücut Sıvı Atıkları ile Kan ve Serum Döküntüleri HIV (AIDS) ve HBV'ye karşı (Hepatitis B Virüsü) %10 plazma 1 dakikada kesin sonuç.	Atık ve döküntü hazırlanan solüsyon ile yıkanır. Eldiven kullanılmalıdır.
5.000ppm	3	5	HIV (AIDS) ve HBV (Hepatitis B Virüsü) riski olabilecek Ameliyathaneler, Morg ve Otopsi Odaları, Laboratuvarlar gibi bölgeler. Paslanmaz Çelik Cerrahi Malzemeler. Ördekler, Sürgüler, Plastik Malzemeler, Anestezi Malzemeleri -%10 plazma 2 dakikada kesin sonuç.	Yüzeyle hazırlanan Klortab® NaDCC solüsyonu ile silinir. Paslanmaz çelik malzemeler 30 dakikadan fazla solüsyon içinde bırakılmamalı, kaplama metaller ile kullanılmamalıdır. Eldiven kullanılmalıdır. Gerekliğinde solüsyona anyonik bir deterjan ilave edilerek temizlik ve dezenfeksiyon aynı anda sağlanır.
1.000ppm	3	1	Ameliyathaneler, Morg ve Otopsi Odaları, Koridorlar, Yanık Üniteleri, Yoğun Bakım Üniteleri, Klinik ve Patoloji Laboratuvarları	Yüzeyle hazırlanan Klortab® NaDCC solüsyonu ile silinir. Temiz malzemeler 30 dakika süreyle solüsyon içinde bırakılır. Gerekliğinde solüsyona anyonik bir deterjan ilave edilerek temizlik ve dezenfeksiyon aynı anda sağlanır.
200ppm	22,5	1	Mutfak yüzeyleri, gıda depoları, yiyecek hazırlama tezgâhları, lavabolar, küvetler, muayene odaları, steril servisler, koridorlar, bekleme salonları, hasta kabul, hasta ve hasta yakınları ile temas edilen departmanlar, hidroterapi havuzları çevresi, tuvaletler, sedyeler...	Yüzeyle hazırlanan Klortab® NaDCC solüsyonu ile silinir. Temiz malzemeler 30 dakika süreyle solüsyon içinde bırakılır. Gerekliğinde solüsyona anyonik bir deterjan ilave edilerek temizlik ve dezenfeksiyon aynı anda sağlanır.
140ppm	30	1	Bebek biberonları, emzikler, biberon kapakları ile diğer bebek gıda kapları ve oyuncaklar, kirli ve enfekte olmuş çamaşırlar, önlükler, çarşafar vs. Temizlik bezleri, paspaslar, mutfakta kullanılan bezler.	Malzemelerdeki süt artıkları temizlendikten sonra 30 dakika süreyle solüsyon içinde bırakılır.



**KİRLENEN SOLÜSYON TUVALETLERE DÖKÜLEREK HER TÜRLÜ HAŞEREYİ UZAKLAŞTIRIR. KLORTAB DEZENFEKTAN TABLETLERİ 24 SAAT SÜREYLE AKTİVİTESİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR. TABLETLER BAKTERİLERE, FUNGİLERE, MYCOBAKTERİLERE, SPORLARA VE VİRÜSLERE (HIV VE HBV DAHİL) KARŞI 10.000PPM'DE 1 DAKİKA, 5.000PPM'DE 2 DAKİKADA ETKİLİDİR.**

## DAİMA:

- » Eldiven giyilmelidir.
- » Klortab® NaDCC solüsyonu için temiz ve kuru kaplar kullanılmalıdır.
- » Klortab® NaDCC'nin uygun bir şekilde ölçüldüğünden emin olunmalıdır.
- » Her seferinde temiz solüsyon hazırlanmalıdır.
- » Dezenfeksiyon öncesi olası kirler yıkanarak temizlenmelidir (Uygun bir yerde).
- » Kullanımdan sonra veya gün sonunda solüsyon mutlaka dökülmelidir.
- » Solüsyon hazırlama kabının kapağı açılmadan önce tabletlerin tamamen çözündüğünden emin olunmalıdır.
- » **GÖRÜLEBİLECEK HER HANGİ BİR ZEHİRENME VAKASINDA ULUSAL ZEHİR MERKEZİNİN (UZEM) 114 NO.LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

## ASLA:

- » İpek ve yün gibi hayvani liflerle kullanılmamalıdır.
- » Paslanmaz çelik malzemelerle uzun süreli temasından kaçınılmalıdır.
- » Asitlerle ve kuvvet indirgeyici faktörlerle karıştırılmamalıdır.

**Uyarılar:** Serin ve rutubetsiz yerlerde saklanmalıdır. Yutulmamalıdır. Gözlerle teması halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır.

**Hazırlanan Klortab Dezenfektan Solüsyonunun önerilen kullanım süreleri:** Görsel bir kirlilik meydana geldiğinde solüsyon kullanım süresine bakılmaksızın değiştirilmelidir.

**1 – 1.000ppm = 1 gün,  
1.000 – 2.500ppm = 2 gün,  
2.500 – 10.000ppm = 7 gün**

# KLORTAB®

## NaDCC

### ÜRETİCİ FİRMA:

**Is bio sept** BİOSEPT MEDİKAL, ENDÜSTRİYEL VE TEKNİK SİSTEMLERİ İTH. İHR. LTD. ŞTİ.  
Tel. : 0312.3970142 / Faks : 0312. 397 0153  
www.biosept.com.tr / biosept@biosept.com.tr

### TEK YETKİLİ TEMSİLCİSİ:

**HAZERHAN TIBBİ VE TEKNİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ**  
Macun Mahallesi, Batı Bulvarı, ANKARA  
Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi, C-Blok  
NO: 1/86, TR-06105 Yenimahalle - ANKARA  
www.hazerhan.com  
hazerhan@hazerhan.com  
Tel. : 0312 397 70 13 (pbx)  
Faks : 0312 397 75 64