

Önleyici tedbirler ilaç tedavisinden daha kolay ve daha ucuzdur.

KLORTAB®
NaDCC



NaDCC, kendisini süper bir klor verici haline getiren eşsiz özelliklere sahiptir.

Klortab® NaDCC Efervesan Yer ve Yüzey Dezenfeksiyon Tabletleri **KLORTAB® 20gr x 50 tablet**

Klortab® NaDCC (20gr x 50 tablet) Efervesan Dezenfektan Tabletler 20 gram nominal ağırlığa sahip olup, 10 gram aktif madde (NaDCC) ve 6 gram elde edilebilir klor ihtiva etmektedir.

Ticari takdim şekli: 50 tablet / kutu

Klortab® NaDCC tabletlerinin başlıca avantajları

- » Tabletler kesin bir güce sahiptir, daima elde edilebilir kloru belirlenmiş bir seviyede verirler,
- » Uygun ve kolay bir kullanıma sahiptirler. Basit bir şekilde suya katılır ve erimesi için beklenir.
- » Ekonomik kullanım. Tabletlerin sağladığı kolay seyreltme sistemi sayesinde aşırı doz ortadan kaldırılarak düşük dozajlama potansiyelini önemli derecede ortadan kaldırır.
- » Depolanması ve dağıtımı kolaydır. Etrafa sıçramazlar ve dağılmazlar.
- » Sıvı dezenfektanlardan çok daha fazla emniyetlidir. Dolayısıyla kaza ve personel yaralanması riskini en alt düzeye indirir.
- » Sıvı dezenfektanlara göre çok daha az koroziftir. Ortak kullanıma sahip metaller üzerinde yapılan testler sıvı beyazlatıcıların tabletlere göre çok daha fazla korozif olduğunu göstermektedir.
- » Özellikle kirlenme mevcudiyetinde sıvı ağartıcılardan güç bazında daha fazla biyosidal özelliklere ve dayanıma sahiptir.

DOZAJLAMA TABLOSU ve KULLANIM ALANLARI

Önerilen Klortab Gücü	Su Miktarı (Litre)	Tablet Sayısı (Ad.)	Dezenfeksiyon Alanı	Kullanım Şekli
10.000ppm	6	10	Vücut Sıvı Atıkları ile Kan ve Serum Döküntüleri HIV (AIDS) ve HBV'ye karşı (Hepatitis B Virüsü) %10 plazma 1 dakikada kesin sonuç.	Atık ve döküntü hazırlanan solüsyon ile yıkanır. Eldiven kullanılmalıdır.
5.000ppm	6	5	HIV (AIDS) ve HBV (Hepatitis B Virüsü) riski olabilecek Ameliyathaneler, Morg ve Otopsi Odaları, Laboratuvarlar gibi bölgeler. Paslanmaz Çelik Cerrahi Malzemeler. Ördekler, Sürgüler, Plastik Malzemeler, Anestezi Malzemeleri -%10 plazma 2 dakikada kesin sonuç.	Yüzeyle hazırlanan Klortab® NaDCC solüsyonu ile silinir. Paslanmaz çelik malzemeler 30 dakikadan fazla solüsyon içinde bırakılmamalı, kaplama metaller ile kullanılmamalıdır. Eldiven kullanılmalıdır. Gerekliğinde solüsyona anyonik bir deterjan ilave edilerek temizlik ve dezenfeksiyon aynı anda sağlanır.
1.000ppm	6	1	Ameliyathaneler, Morg ve Otopsi Odaları, Koridorlar, Yanık Üniteleri, Yoğun Bakım Üniteleri, Klinik ve Patoloji Laboratuvarları	Yüzeyle hazırlanan Klortab® NaDCC solüsyonu ile silinir. Temiz malzemeler 30 dakika süreyle solüsyon içinde bırakılır. Gerekliğinde solüsyona anyonik bir deterjan ilave edilerek temizlik ve dezenfeksiyon aynı anda sağlanır.
200ppm	45	1	Mutfak yüzeyleri, gıda depoları, yiyecek hazırlama tezgâhları, lavabolar, küvetler, muayene odaları, steril servisler, koridorlar, bekleme salonları, hasta kabul, hasta ve hasta yakınları ile temas edilen departmanlar, hidroterapi havuzları çevresi, tuvaletler, sedyeler...	Yüzeyle hazırlanan Klortab® NaDCC solüsyonu ile silinir. Temiz malzemeler 30 dakika süreyle solüsyon içinde bırakılır. Gerekliğinde solüsyona anyonik bir deterjan ilave edilerek temizlik ve dezenfeksiyon aynı anda sağlanır.
140ppm	60	1	Bebek biberonları, emzikler, biberon kapakları ile diğer bebek gıda kapları ve oyuncaklar, kirli ve enfekte olmuş çamaşırlar, önlükler, çarşafar vs. Temizlik bezleri, paspaslar, mutfakta kullanılan bezler.	Malzemelerdeki süt artıkları temizlendikten sonra 30 dakika süreyle solüsyon içinde bırakılır.



KİRLENEN SOLÜSYON TUVALETLERE DÖKÜLEREK HER TÜRLÜ HAŞEREYİ UZAKLAŞTIRIR. KLORTAB DEZENFEKTAN TABLETLERİ 24 SAAT SÜREYLE AKTİVİTESİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR. TABLETLER BAKTERİLERE, FUNGİLERE, MYCOBAKTERİLERE, SPORLARA VE VİRÜSLERE (HIV VE HBV DAHİL) KARŞI 10.000PPM'DE 1 DAKİKA, 5.000PPM'DE 2 DAKİKADA ETKİLİDİR.

DAİMA:

- » Eldiven giyilmelidir.
- » Klortab® NaDCC solüsyonu için temiz ve kuru kaplar kullanılmalıdır.
- » Klortab® NaDCC'nin uygun bir şekilde ölçüldüğünden emin olunmalıdır.
- » Her seferinde temiz solüsyon hazırlanmalıdır.
- » Dezenfeksiyon öncesi olası kirler yıkanarak temizlenmelidir (Uygun bir yerde).
- » Kullanımdan sonra veya gün sonunda solüsyon mutlaka dökülmelidir.
- » Solüsyon hazırlama kabının kapağı açılmadan önce tabletlerin tamamen çözündüğünden emin olunmalıdır.
- » **GÖRÜLEBİLECEK HER HANGİ BİR ZEHİRENME VAKASINDA ULUSAL ZEHİR MERKEZİNİN (UZEM) 114 NO.LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

ASLA:

- » İpek ve yün gibi hayvani liflerle kullanılmamalıdır.
- » Paslanmaz çelik malzemelerle uzun süreli temasından kaçınılmalıdır.
- » Asitlerle ve kuvvet indirgeyici faktörlerle karıştırılmamalıdır.

Uyarılar: Serin ve rutubetsiz yerlerde saklanmalıdır. Yutulmamalıdır. Gözlerle teması halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır.

Hazırlanan Klortab Dezenfektan Solüsyonunun önerilen kullanım süreleri: Görsel bir kirlilik meydana geldiğinde solüsyon kullanım süresine bakılmaksızın değiştirilmelidir.

**1 – 1.000ppm = 1 gün,
1.000 – 2.500ppm = 2 gün,
2.500 – 10.000ppm = 7 gün**

KLORTAB®

NaDCC

ÜRETİCİ FİRMA:

Is bio sept BİOSEPT MEDİKAL, ENDÜSTRİYEL VE TEKNİK SİSTEMLERİ İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
Tel. : 0312.3970142 / Faks : 0312. 397 0153
www.biosept.com.tr / biosept@biosept.com.tr

TEK YETKİLİ TEMSİLCİSİ:

HAZERHAN TIBBİ VE TEKNİK SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
Macun Mahallesi, Batı Bulvarı, ANKARA
Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi, C-Blok
NO: 1/86, TR-06105 Yenimahalle - ANKARA
www.hazerhan.com
hazerhan@hazerhan.com
Tel. : 0312 397 70 13 (pbx)
Faks : 0312 397 75 64